

伤口护理敷料选用指南

拜尔坦® 有粘胶泡沫敷料

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	7.5×7.5cm 1×32×10	3462
	10×10cm 1×24×10	3430
	12.5×12.5cm 1×24×10	3420
	15×15cm 1×24×5	3421
	18×18cm 1×16×5	3423
	18×28cm 1×8×10	3426
	17×17cm 瓶尾贴1×16×5	3483
	23×23cm 瓶尾贴1×16×5	3485
	Ø 17cm 蝶形贴1×16×5	3486
	19×20cm 足跟贴1×16×5	3488

拜尔坦® 无粘胶泡沫敷料

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	5×7cm 1×24×10	6105
	10×10cm 1×24×10	3410
	10×20cm 1×32×5	3412
	15×15cm 1×16×5	3413
	20×20cm 1×16×5	3416
	5×8cm 填充型 1×32×10	3451

拜尔坦® 自粘型泡沫敷料

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	5×7cm 1×32×5	3473
	10×10cm 1×48×5	3470
	10×20cm 1×32×5	3472
	15×15cm 1×16×5	3475

拜尔坦® 银离子有粘胶泡沫敷料

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	7.5×7.5cm 1×32×5	9631
	12.5×12.5cm 1×48×5	9632
	15×15cm 1×16×5	3464
	18×18cm 1×16×5	9635
	23×23cm 瓶尾贴1×16×5	9641
	19×20cm 足跟贴1×16×5	9643

拜尔坦® 银离子无粘胶泡沫敷料

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	5×7cm 1×32×5	5105
	5×8cm 1×32×5	9628
	10×10cm 1×48×5	9622
	10×20cm 1×48×5	9623
	15×15cm 1×16×5	9625
	20×20cm 1×16×5	9626

拜尔坦® 藻酸盐敷料

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	5×5cm 1×24×30	3705
	10×10cm 1×24×10	3710
	15×15cm 1×24×10	3715
	3×44cm 1×20×6	3740

拜尔坦® 银离子藻酸盐抗菌敷料

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	5×5cm 1×24×30	3755
	10×10cm 1×24×10	3760
	15×15cm 1×24×10	3765
	3×44cm 1×24×10	3780

康惠尔® 水胶体溃疡贴

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	4×6cm 1×24×30	3146
	10×10cm 1×24×10	3110
	15×15cm 1×48×5	3115
	20×20cm 1×28×5	3120
	5×25cm 1×28×5	3548
	18×20cm 瓶尾贴1×48×5	3285
	6×8cm 蝶形贴1×48×5	3280
	9×11cm 蝶形贴1×48×5	3283

康惠尔® 水胶体透明贴

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	5×7cm 1×30×10	3530
	10×10cm 1×24×10	3533
	9×14cm 1×24×10	3536
	15×15cm 1×48×5	3539
	15×20cm 1×48×5	3542
	20×20cm 1×28×5	3545
	5×25cm 1×28×5	3548

康惠尔® 清创胶

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	15克 1×18×10	3900
	25克 1×24×10	3903

康惠尔® 水胶体油纱

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	10×10cm 1×36×10	3910
	15×20cm 1×17×10	3915

康惠尔® 银离子水胶体油纱

规格	包装 (件*盒*片)	代码
	10×10cm 1×17×10	3926
	15×15cm 1×36×10	3927

参考文献

1. Sibbald, R.G.et al, Preparing the Wound Bed 2003: Focus on infection and inflammation, Ostomy/Wound Management, November 2003, Vol. 9⁽¹¹⁾: 24-51.

2. Fletcher, J. A practical approach to dressing wounds in difficult positions. British Journal of Nursing, 1999, Vol. 8⁽¹²⁾:779-786

“本手册旨在帮助临床中敷料的具体应用，但是这应被看作是患者为中心的伤口管理中一个组成部分”。

—专家组意见

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast 是丹麦Coloplast A/S拥有的注册商标。©版权所有
620NWC0018, V02-201312, printed on December, 2013.

Coloplast

康乐保 (中国) 医疗用品有限公司
地址: 中国北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座10层
电话: 010-59201888 传真: 010-59201899 邮编: 100028
www.coloplast.com.cn

Coloplast

患者为本的理念在伤口管理的应用

敷料的使用是伤口整体护理和体现患者为本理念的重要组成部分。其中一个重要目标就是创造最佳的伤口愈合微环境。但是，在先于查看伤口之前，要关注患者整体状况，可能的致病原因，以及患者的主要不适主诉，是非常必要的。


患者为本理念更强调对于慢性伤口患者的护理不仅要重视伤口，还要关注到由于伤口引起的其它相关问题如：气味，渗漏，浸渍，疼痛，感染，以及出现的社会交往减少。

尽管已经有了诸多关于伤口护理的敷料类型和不同伤口组织存活能力的教育资料，仍然有一些伤口对于敷料的使用要求有相当的挑战性。

本指南是由那些在其日常临床实践中对不易剪裁敷料的特殊部位伤口的护理有着丰富经验的专家们制订的。

如果您对任何未被列入本手册中的敷料剪裁形状有问题或者建议，请联系康乐保（中国）医疗用品有限公司。

我们希望此手册能够到您的患者的伤口治疗有所裨益。

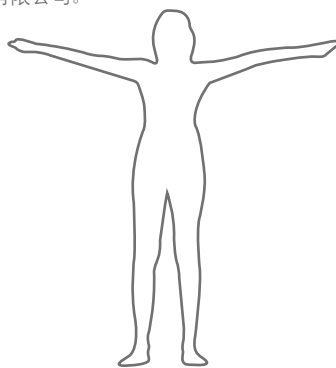

敷料剪贴指南

编 著
Pia Carlsen, RN, Denmark
Jacqui Fletcher, Principal
Lecturer, MSc BSc (Hons) PG
Dip (ED) RN ILT, UK
Maria Mousely, AHP, Consultant
Podiatrist, UK
Henri Post, M.A., Nurse
Practitioner, RN, Netherlands
Adrienne Taylor, MSc, RN, RM,
DN, UK
Wilma Verbeek-Gijsbers, RN,
Netherlands
Robert Zimmer, RN, Germany



洗手

永远记得在接触敷料的前后一定要洗手。
遵循感染控制指南中的要求对敷料进行操作。
声明：作为通用指南，请注意和您所在国家和当地的医疗机构常用治疗方案进行综合比较后使用。



耳部



对于像吸氧管造成的耳部损伤，将透明贴敷料剪成约2×3cm大小的细条，把未剪切一段固定在较平整的头部，然后把剪切的两个片段沿着耳朵固定。此方法同样也适用于鼻部伤口。



耳部



将大小约5×7cm的康惠尔透明贴敷料，切成细条，对折一半长度后，沿着一侧外围剪成0.5cm间隔的切口。首先将未剪切的部分固定在耳廓上，然后将剪切片段沿着耳廓形状顺势固定。如果伤口较湿润，可以先用小片藻酸盐敷料垫底。



耳部



这类伤口适用拜尔坦无粘胶泡沫敷料或者拜尔坦自粘型敷料。将敷料剪裁成贴合耳部的形状，再用二层敷料固定。



肘部



将敷料做三角形小切口，将肘部弯曲90度再固定敷料，剪开处略作重叠粘贴调整至合适。



手部



对于手侧如拇指/尾指边缘，可将敷料做边缘做一平行切口，正确覆盖一侧后，沿手型固定另一侧。如果为细菌感染，选用拜尔坦银离子泡沫敷料更合适。



手指



位于手指间的伤口可以选用拜尔坦无粘胶泡沫敷料做切口套于指间，再用二层敷料固定。



手指



敷料剪切至如图所示形状，不要完全裹紧手指，以免造成止血带式后果。



手指



敷料剪切至如图所示。



踝部



有多种踝部敷料可供选择，根据不同形状选择最合适的使用。



腋窝



用于踝部的敷料也可以用于腋窝伤口。根据渗液的方向来调整最大吸收渗液的部分。



造口伤口



当用于造口术伤口时，需要认真考虑何时将造口袋置于敷料的上面/下面。



骶尾部



根据患者的实际情况有多种不同的骶尾敷料可供选择。如果伤口潮湿，可选用泡沫敷料或者藻酸盐敷料（后者）需要二层敷料。



拇趾外侧



使用拜尔坦无粘胶敷料用于拇趾或趾间溃疡，二层敷料固定。



足趾



将拜尔坦无粘胶敷料剪切成图示的形状，用于趾间伤口。需要二层敷料固定。



足趾



剪裁无粘胶敷料如图所示用于脚趾末端伤口，再用管状胶布和纱布固定。



足趾



如图所示剪裁弓形透明贴敷料。使细长的部分贴合足部。拜尔坦无粘胶敷料在缓解行走时足部压力的时候比粘胶敷料更适合。



足趾



对于潮湿伤口采用泡沫敷料更合适，还需要进一步固定。

常用信息：

声明：本手册作为一般性的指南，请注意和您所在国家和当地的医疗机构常用治疗方案进行综合比较后应用。

- 总是努力寻找出现伤口的原因；
- 遵循当地的预防感染指南以防止交叉感染；
- 正确使用锐利、清洁的剪刀；
- 确认总是在卷曲的敷料后部进行剪切，不然后面的粘附纸难以去除；
- 尽可能剪裁敷料边缘圆滑以利于更好的固定；
- 对于粘附型敷料，保留剩下的背衬纸以作为下一个患者使用的模版。
- 非粘附型敷料则可以画出大致形状；
- 总是关注伤口周边皮肤，尽可能保护其完整；
- 大多数厂家推荐敷料覆盖在伤口中央区域。也需要考虑合适的调整使得渗出液更好的流出被吸收；
- 不要使用张力性敷料以免皮肤起泡；
- 虽然有些敷料有衬垫或能减少摩擦，但它们并不能减轻压力；
- 所有的关节的敷料使用原则基本类似，手册中给出的踝部、肘部和膝部的方法同样适用于其它各关节。